

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

# NasoAid

## Intranasal Splint (Sterile)












MOHW-MD-(I) No.000000

# 鼻即安


## 鼻腔內固定物(滅菌)

衛部醫器製壹字第 000000 號

### 符號標示

 單次使用	 型號
 詳閱說明書	 製造批號
 經輻射滅菌	 儲存於25°C以下
 不可重複滅菌	 避免日曬
 保存期限	 包裝受損不可使用
 製造業者	

步驟三、依實際臨床使用需求，使用含約 10 c.c.之生理食鹽水或無菌水充填至注射針筒，將本產品的外緣進行水合，直到本產品開始膨脹並填滿鼻腔。

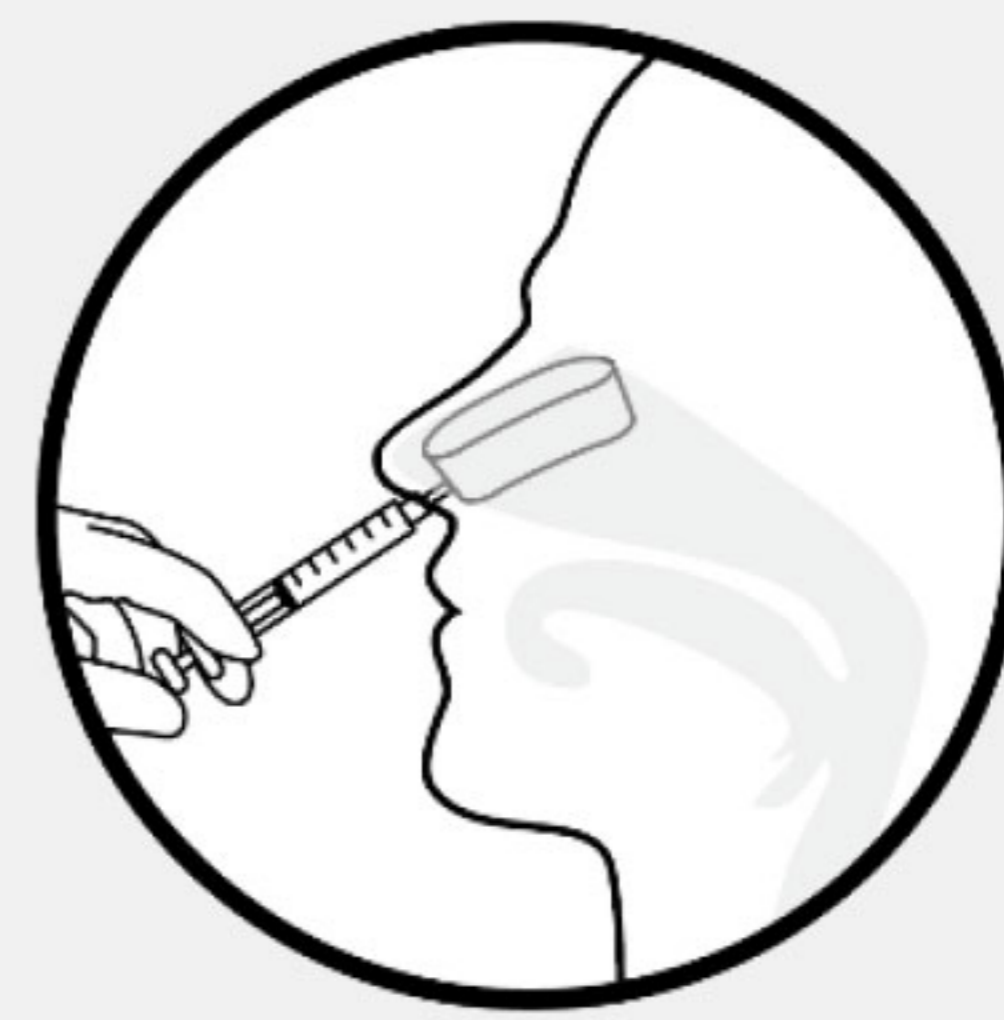

### 注意事項

1. 本產品不應使用在受感染的傷口部位。
2. 使用本產品前請仔細清理污染之傷口，以避免傷口感染。
3. 雖然本產品可減少出血，但不宜應用於治療凝血功能異常的病患。
4. 本產品使用於懷孕婦女之安全性，至今未有臨床試驗評估資料，因此醫師應視實際需要狀況加以衡量使用。
5. 有嚴重過敏史之患者或牛膠原蛋白/羧甲基纖維素過敏者不適用。
6. 在罕見的情況下，無論有無鼻腔內固定物，凡是與鼻腔手術有關的物理化學條件都可能存在中毒性休克症候群的風險。
7. 使用前請確認產品保存期限，請勿使用已超過保存期限之產品。
8. 請勿使用包裝有破損之產品，因為無法確保該產品之無菌狀態。
9. 本產品限一次使用，不可重複使用或是再次滅菌。

### 產品說明

本產品是由牛筋組織萃取的膠原蛋白及植物萃取之羧甲基纖維素複合組成之鼻腔內固定物，產品外觀呈現白色、具有高孔隙度。本產品具備良好的生物相容性，以及高度的連通孔洞，因此可快速吸收大量液體，本產品採用無菌性包裝且限一次性使用。

### 適用範圍


本產品適用於接受鼻/鼻竇手術之患部，可放置於鼻腔內作為鼻腔內固定物，用於減少出血及水腫，並預防鼻腔與中隔黏著。

### 使用方法


本產品由人體自然孔洞置入人體。在鼻竇手術後，可在抗生素使用後直接用鑷子或鉗子將本產品插入患部，可藉由吸收血液或鼻腔液體後緩慢崩解為碎片，同時提供傷口支撐性。崩解後的碎片可通過自然孔排出或於術後14日內被移除。感染及中毒性休克症候群風險極低。

### 操作步驟

步驟一、將本產品取出，並使用外科手術器械將本產品壓扁至符合可置入患部之大小。

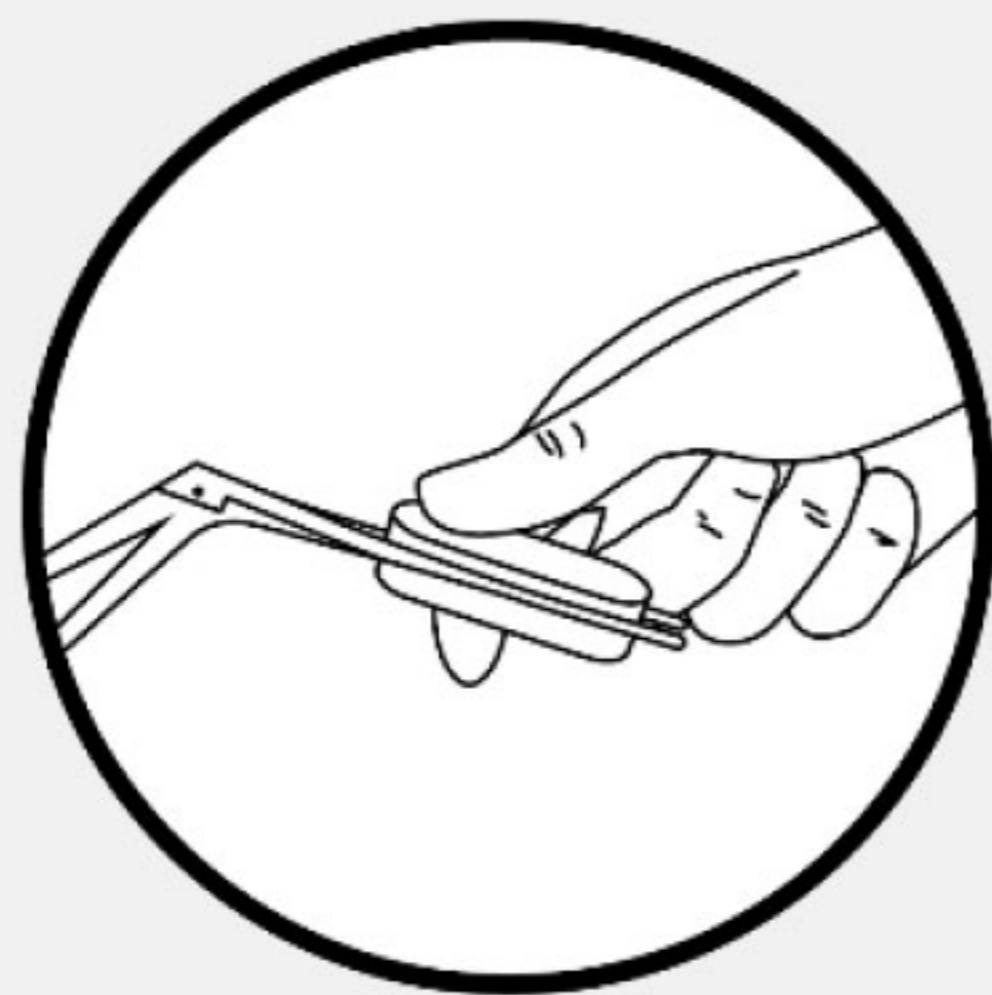

步驟二、使用外科手術器械夾取壓扁後的本產品，沿著鼻腔底部輕輕插入，直到整個產品進入鼻腔患部內。

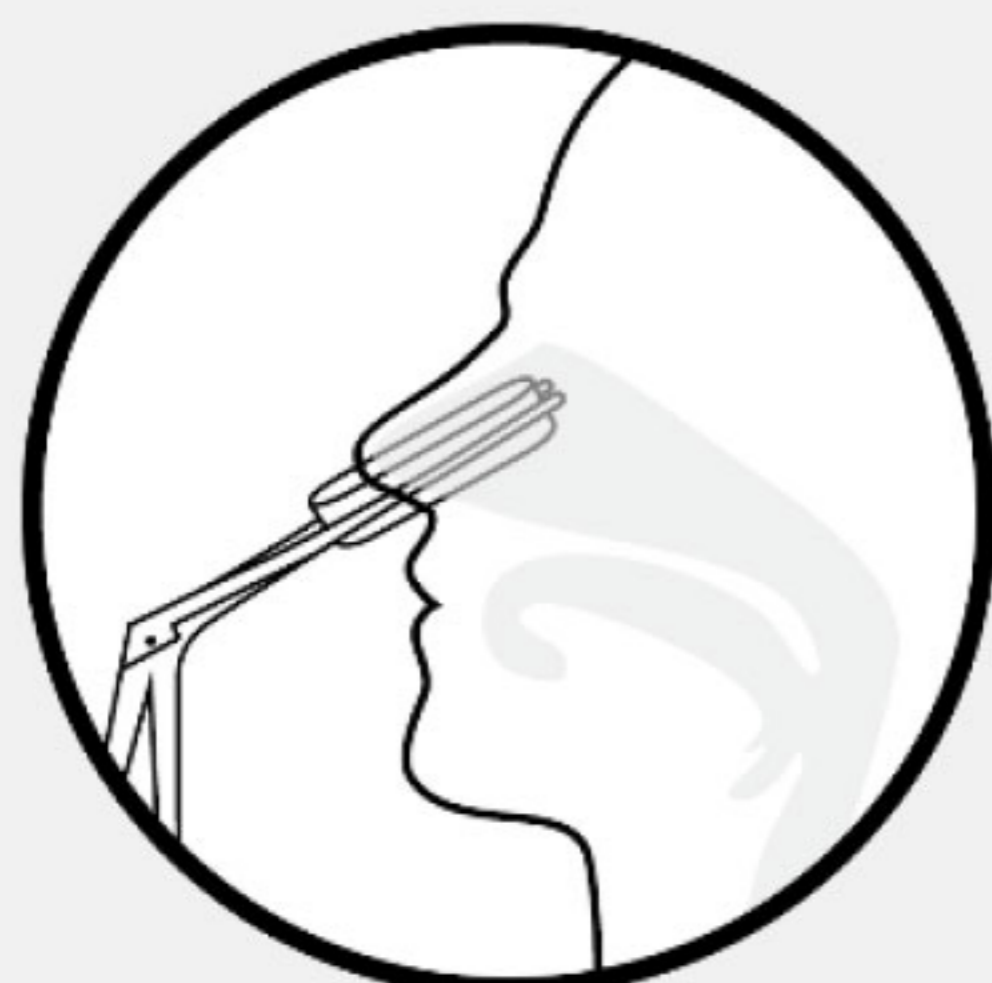

### 產品規格與組成

成份	含量	成份功效
膠原蛋白	70±10%	提供高孔隙率的海綿結構，可吸收大量液體，使海綿結構膨脹，維持鼻腔內空間，形成物理性屏障預防鼻腔與中隔黏著。
羧甲基纖維素	30±10%	羧甲基纖維素具有保濕及結構崩散的功能，讓產品置於鼻腔後，14日內可緩慢崩解為碎片。

型號	規格
NSA-202015	20mm × 20mm x 15mm
NSA-402015	40mm × 20mm x 15mm
NSA-602015	60mm × 20mm x 15mm
NSA-802015	80mm × 20mm x 15mm

### 保存條件 & 有效期間

保存溫度：<25°C，不可暴露於極端的環境條件中。  
有效期間：3年 (儲存於室溫)。